

# Gebrauchsanweisung


## Anleitung zum Ziehen

1




Den Retmex öffnen.

2

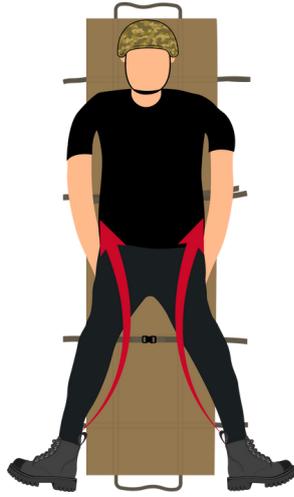


Das Fußteil zwischen die Beine des Patienten ziehen. Sicherstellen, dass er wie eine "Windel" sitzt.

3

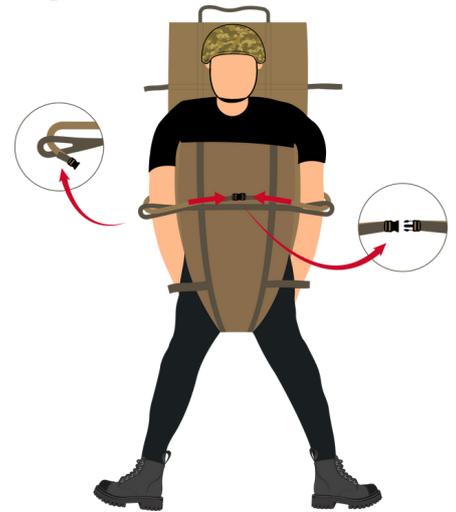

Um den Patienten im Retmex zu fixieren, werden die Fixierungsgurte durch die Griffe gezogen und dann geschlossen.

4

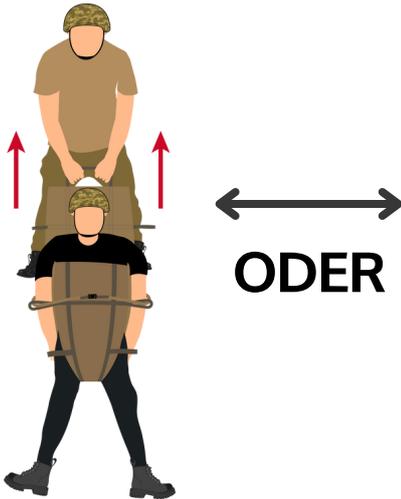

Den Patienten nun am Griff in Sicherheit ziehen.



Wir der Retmex zu zweit bedient, werden die Griffe an den Längsseiten zum Ziehen genutzt.

← →  
**ODER**

**! TIPP**

Darauf achten, dass die Arme unter den Fixierungsgurten positioniert sind.

**! WARNUNG**

Reibung durch Ziehen über scharfe Kanten oder Vorsprünge kann den Retmex beschädigen und somit die Wirksamkeit des Produkts verringern.

## Anleitung zum Heben

- Den Patienten in der Mitte des Rettungstuches platzieren. Wenn nötig, das Logroll-Manöver anwenden, um das Rettungstuch unter den Patienten zu legen.
- Wird das Rettungstuch von zwei Personen bedient, sollte eine Person am Fußende und eine Person am Kopfende stehen. Darauf achten, den Rücken in einer geraden Position zu halten, um Verletzungen zu vermeiden, und immer aus den Knien heben.
- Im Idealfall sollte das Rettungstuch mit mindestens 3 oder 4 Rettern gleichzeitig benutzt werden. Dabei die Griffe an den Längsseiten des Rettungstuches nutzen, um den Patienten anzuheben und in Sicherheit zu bringen.

**! WARNUNG**

Beim Heben Vorsicht walten lassen. Stellen Sie sicher, dass Ihnen die richtigen Handhabungstechniken vertraut sind. Das Heben schwerer Objekte kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

